

# КОЛДІСЕПТ

## НАНО СІЛЬВЕР



### Вушні краплі

#### Медичний виріб

#### Інструкція для застосування

Медичний виріб у вигляді вушних крапель призначений для підтримуючого лікування запалення зовнішнього слухового проходу, що викликане бактеріальними та грибковими інфекціями.

Колдісепт наноСільвер вушні краплі призначені для введення в зовнішній слуховий прохід з метою пом'якшення та видалення будь-яких забруднень, а також для створення захисного бар'єру на поверхні шкіри. Медичний виріб містить наночастинки срібла та міді, які стримують зростання бактерій та грибків. Вушні краплі Колдісепт наноСільвер призначені для підтримуючого лікування запалення зовнішнього вуха різної етіології.

**Склад:** вода очищена, гліцерин, пропіленгліколь, наноколоїдне срібло, наноколоїдна мідь.

#### Використання та дозування:

Використовуйте Колдісепт наноСільвер вушні краплі 3 рази на день, щонайменше протягом 3 днів після зникнення симптомів запалення.

Для того, щоб запобігти неприємним відчуттям у результаті контакту шкіри слухового проходу з холодним розчином, слід зігріти флакон у руках.

Перед застосуванням медичного виробу нахилити голову або лягти на бік хворим вухом догори.

Закапайте 5 крапель (якщо лікар не рекомендував іншу кількість) та залишайтеся в цьому положенні протягом 3-5 хвилин.

Використовуйте систематично відповідно до індивідуальних потреб.

#### Побічні ефекти:

Побічні ефекти після використання медичного виробу невідомі, проте у людей з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції. При виникненні алергічної реакції слід припинити застосування медичного виробу.

## Додаткова інформація та протипоказання:

Не використовуйте медичний виріб у разі наявності у вас алергії на будь-який з його інгредієнтів або алергії на срібло.

Не слід використовувати медичний виріб у разі наявності перфорації барабанної перетинки.

Не слід вставляти дозатор занадто глибоко у вушний канал.

Уникайте випадкового потрапляння в очі та рот.

Припиніть використання медичного виробу в разі виникнення будь-яких симптомів.

Вагітним жінкам і дітям у віці до 6 років рекомендується використовувати медичний виріб тільки під наглядом лікаря.

При виникненні небажаних явищ, пов'язаних із застосуванням медичного виробу, слід повідомляти інформацію виробнику або уповноваженому представнику.

## Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25 °C, в сухому, недоступному для дітей місці.

**Термін придатності:** 3 роки.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

**Упаковка:** по 15 мл (ml) у флаконі з крапельницею та кришкою. Дотримуйтесь правил, які викладені в Інструкції для застосування.

## Пояснення символів, зазначених на упаковці

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Ознайомтесь з інструкцією для застосування |
|  | Використати до                             |
|  | Знак Європейської відповідності            |
|  | Виробник                                   |
|  | Номер партії                               |
|  | Знак відповідності технічним регламентам   |
|  | Температурне обмеження                     |

Дата останнього перегляду: 20.01.2023

 **Виробник:**  
АРКОНА Лабораторія  
Стоматологічної Фармакології  
Гжегожа Калбарчика  
Насутув 99C, 21-025  
Немце, Польща.

**ARKONA Laboratorium**  
**Farmakologii Stomatologicznej**  
**Grzegorz Kalbarczyk**  
Nasutów 99C, 21-025  
Niemce, Poland.



**Вироблено в ЄС для**  
**Альпен Фарма АГ,**  
Берн, Швейцарія



**Уповноважений представник**  
**в Україні:** ПрАТ «Натурфарм» Україна,  
04075 Київ, Пуща-Водиця,  
вул. Лісна, 30-А, телефон (044) 401-81-03.