

КОЛДІСЕПТ

НАНО СІЛЬВЕР



Назальний спрей

Медичний виріб

Інструкція для застосування

Медичний виріб у вигляді спрею усуває відчуття сухості та подразнення слизової оболонки носа, одночасно захищаючи від шкідливих зовнішніх факторів.

Колдісепт наноСільвер назальний спрей зволожує та заспокоює слизову оболонку носа, підтримуючи її регенерацію і знімаючи відчуття печіння.

Медичний виріб містить наночастки срібла, які обмежують ріст бактерій. Медичний виріб утворює шар гелю, який захищає від бактерій і вірусів та підтримує регенерацію слизових оболонок.

Властивості медичного виробу є результатом дії мінеральних солей та рослинних екстрактів.

Склад: вода очищена, наноколоїдне срібло, екстракт ірландського моху, сорбітол, гліцерин, мінеральні солі, натрію бензоат, лимонна кислота.

Призначений до використання:

Підходить для застосування в усіх випадках сухості та подразнення слизової оболонки носа незалежно від причини.

Особливо при:

- атрофічному риніті
- інфекційному або алергічному риніті
- застосуванні препаратів, що пошкоджують епітелій слизової оболонки носа
- підтримуючому лікуванні синуситів
- забрудненні або запиленості повітря
- екстремальних температурах
- застосуванні у літніх пацієнтів
- сухості слизової оболонки носа, пов'язаної з впливом опалення або роботою кондиціонеру
- курінні.

Використання та дозування:

Використовуйте виріб 3-4 рази на день відповідно до індивідуальних потреб.

Перед першим використанням натисніть на дозатор декілька разів.

Вставити кінчик дозатора назального спрею в ніздрю, натиснути на розпилювач.

Застосовувати по 1-2 розпиленню в кожную ніздрю.

Побічні ефекти:

Побічні ефекти після використання медичного виробу невідомі, проте у людей з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції. При виникненні алергічної реакції слід припинити застосування медичного виробу.

Додаткова інформація та протипоказання:

Не використовуйте медичний виріб у разі наявності у вас алергії на будь-який з його інгредієнтів або алергії на срібло.

Уникайте випадкового потрапляння в очі.

Припиніть використання медичного виробу в разі виникнення будь-яких симптомів.

У разі забруднення зніміть дозатор-розпилювач, промийте і прокип'ятіть його або ретельно промийте окропом.

Вагітним жінкам і дітям у віці до 6 років рекомендується використовувати медичний виріб тільки під наглядом лікаря.

Медичний виріб можна використовувати протягом тривалого часу без ризику виникнення звикання, побічних ефектів або ускладнень.

При виникненні небажаних явищ, пов'язаних із застосуванням медичного виробу, слід повідомляти інформацію виробнику або уповноваженому представнику.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25 °C в сухому, недоступному для дітей місці.

Термін придатності: 3 роки.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

Упаковка: по 20 мл (ml) (200 доз) у флаконі з дозатором-розпилювачем та ковпачком.

Дотримуйтесь правил, які викладені в Інструкції для застосування.

Пояснення символів, зазначених на упаковці

	Ознайомтесь з інструкцією для застосування
	Використати до
	Знак Європейської відповідності
	Виробник
	Номер партії
	Знак відповідності технічним регламентам
	Температурне обмеження

Дата останнього перегляду: 10.02.2021

 **Виробник:**
АРКОНА Лабораторія
Стоматологічної Фармакології
Гжегожа Калбарчика
Насутув 99С, 21-025
Немце, Польща.



Вироблено в ЄС для
Альпен Фарма АГ,
Берн, Швейцарія



ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99C, 21-025
Niemce, Poland.

Уповноважений представник
в Україні: ПрАТ «Натурфарм» Україна,
04075 Київ, Пуца-Водиця,
вул. Лісна, 30-А,
телефон (044) 401-81-03.